


# Lautstärke regeln

Grundsätzlich gilt:


Nach oben lauter, nach unten leiser. (HdO- Geräte)

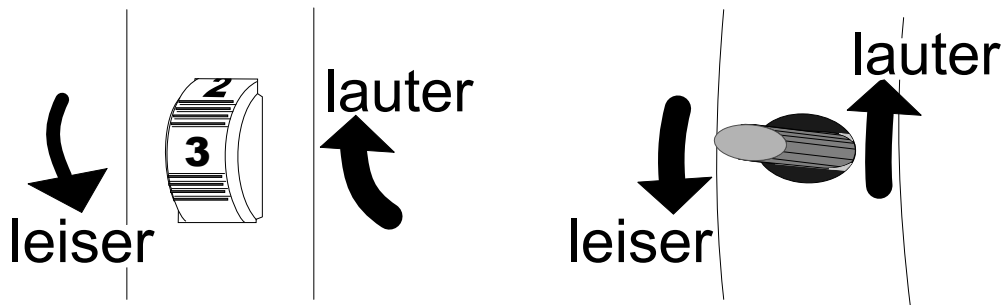

Zahlen sind relativ. Sie sagen nichts über die tatsächliche Lautstärke/ Verstärkung aus. Vorsicht beim Abhören mit Stetoklip! Auch kleine Geräte können hohe Ausgangspegel erreichen.

Deshalb: **Vor dem Einschalten Potentiometer nach unten stellen und langsam vortasten.**

## Bei IdO- Geräten (Verstärker ist im Ohrstück eingebaut)

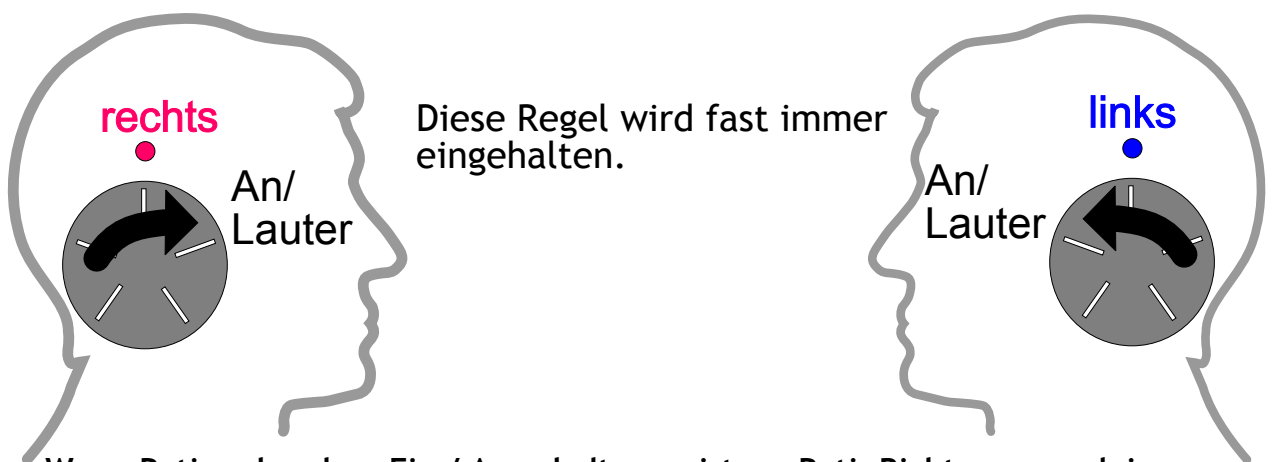

Wenn Poti vorhanden: Ein-/ Ausschalter meist am Poti. Richtung ganz leise bis zum Anschlag = AUS. (rastet ein)  
Ist kein Poti vorhanden (Automatik), zum Ausschalten das Batteriefach einfach aufzuklappen. Dies ist im Zweifelsfall immer die sichere Methode.  
Oder: Ein- Ausschalter ist extra als Kippschalter angebracht.

Allgemein sollte ein Hörgerät im eingeschalteten Zustand und entsprechend großer Verstärkung in der Hand des Prüfers ein Rückkopplungspfeifen erzeugen. Bei schwach eingestellten HdO- oder IdO- Geräten sollte das Pfeifen spätestens in der hohlen Hand entstehen. Ist dies nicht der Fall beginnt die **Fehlersuche**.