



# Reinigung von HdO Ohrstücken

mit Reinigungsflüssigkeit im Set

## 7 Schritte zu einem sauberen Ohrpaßstück




Neuer Weg 2 • 64625 Bensheim-Auerbach  
☎ 06251-770366 • Fax: 06251-856099


- 1** Trennen Sie durch kräftiges Ziehen den Schallschlauch vom Hörwinkel Ihres Gerätes. Achten Sie bei 2 Geräten darauf, daß die Seiten nicht verwechselt werden können.




- 2** Legen Sie nur das Ohrstück (auf keinen Fall mit Hörgerät!) mit der verschmutzten Gehörgangsseite nach unten auf das Sieb. Bei starker Verschmutzung mit warmem Wasser vorreinigen.

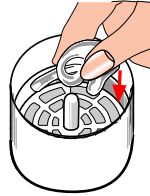


- 3** Füllen Sie die Dose mit Reinigungsflüssigkeit bis das Ohrstück gut bedeckt ist. (Hadeo liquid soft).  
Oder füllen Sie die Dose mit 1cm Reinigungsflüssigkeits-Konzentrat und anschließend mit Wasser 3/4 voll auf. (Verhältnis 1:5)

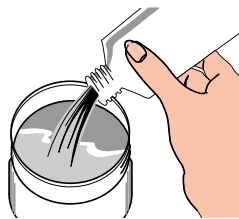

- 4** Bei geschlossenem Deckel mindestens 20-30 Minuten, oder über Nacht, reinigen lassen. Der Deckel schließt dicht und verhindert auch bei Nichtgebrauch Austrocknung und versehentliches Verschütten.

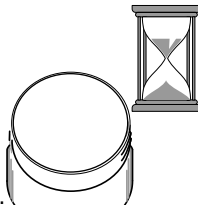


- 7** Zum Schluss nur noch den Hörwinkel des Gerätes in das Schlauchende des Ohrstückes drücken und den Schlauch aufschieben. Bei 2 Geräten auf die richtige Seite achten! (Position, wie in der Abb. unten.) Ist der Schlauch hart und spröde geworden, sollte er beim Akustiker durch einen neuen ersetzt werden.

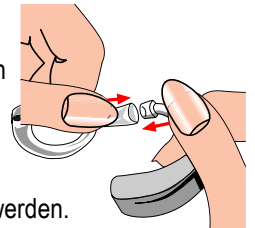


Nach 6-10 Reinigungen sollte die Reinigungsflüssigkeit aus hygienischen Gründen erneuert werden.

### richtige Positionierung

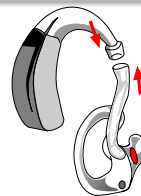

rechtes Ohr

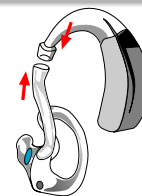

linkes Ohr



falsch

### häufige Ohrstückformen



Ring




Kralle




Spange

**Tipp** Wollen Sie mit wenig Ballast verreisen. Airball mitnehmen, reinigen mit Warmwasser+Seife, trocknen, wie beschrieben. Auch Schweißwasser wird so entfernt. **Nicht im Schallkanal herumstochem!**

- 5** Nehmen Sie das Sieb aus der Dose heraus - Ohrstück mit warmem Wasser gut abspülen und abtrocknen. Danach den Deckel wieder verschließen.

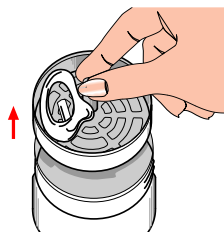

- 6** Den HADEO-Airball fest in den Schallschlauch stecken und mehrmals kräftig durchpusten. Flüssigkeitsreste werden aus dem Schallschlauch und den anderen Hohlräumen entfernt. Nicht zu vergessen ist auch die Zusatzbohrung am unteren Ende des Ohrstückes (falls vorhanden).

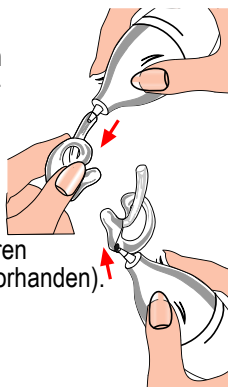

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:

☎ 06251-770366